



Mode d'emploi

CHOISIR la bonne attelle en vous référant à la charte des grandeurs

PLACER l'attelle sous le bras.

MONTER celle-ci vers l'aisselle pour éviter une flexion du coude.

GARDER une espace entre l'attelle et l'aisselle pour éviter des blessures.

RAMENER chaque coté de l'attelle contre le bras.

PLACER des bandes adhésives à chaque extrémité et au centre de celle-ci.

*Utiliser des bandes adhésives transparentes et hypo-allergènes.

Instructions for use

SELECT the correct splint by referring to the size chart.

PLACE the splint under the arm.

MOVE the splint up toward the armpit to prevent the elbow from bending.

KEEP a space between the splint and armpit to prevent injury.

BRING each side of the splint up against the arm.

PLACE strips of adhesive tape across both ends and the middle of the splint.

*Use transparent, hypoallergenic adhesive tape.